

Тимпанальные шунты Trokar

Насаженный на трокар шунт устанавливают в барабанную перепонку без предварительного парацентеза путем простого прокалывания. После установки шунта следует удалить из него трокар.

Благодаря его большому внутреннему просвету тимпанальный шунт Trokar можно использовать также и для длительной вентиляции и дренирования. Одним из его основных преимуществ по сравнению с традиционными шунтами является плотная посадка и идеальные пропорции между размером инцизии на барабанной перепонке и диаметром тимпанального шунта. Это позволяет избежать слишком больших или слишком маленьких насечек, которые могут привести к неудовлетворительному результату операции.

Удаление секрета через шунт возможно сразу после его установки, а большой внутренний диаметр способствует в дальнейшем и самостоятельному его оттоку.



Преимущества:

- Плотная посадка
- Установка без предварительного парацентеза путем простого прокалывания барабанной перепонки
- Почти атравматичная установка и безболезненное удаление
- Эффективен для длительного дренажа и вентиляции барабанной полости
- Быстрая и простая установка возможна и под местным обезболиванием
- Прекрасная биологическая совместимость

- Антибактериальный эффект при использовании позолоченных трубочек.